

Einsendung von Bronchoalveoläre-Lavage-Proben (BAL)

FÜR DIE ERREGERDIAGNOSTIK:

Die erste aspirierte Fraktion unfiltriert in ein separates Transportgefäß überführen.

► Eine Erregerdiagnostik (Kultur und PCR) ist nur aus nativer BAL und nicht aus BAL in Versandmedium möglich!

FÜR DIE ZELLDIAGNOSTIK:

Die aspirierte BAL-Flüssigkeit schnellstmöglich bearbeiten, d. h. gut mischen und durch Mull filtrieren. Beim Sammeln und weiteren Verarbeiten der BAL **nur Polyethylen- oder Polypropylengefäße** verwenden. BAL bis zur Abholung durch den Laborkurier kühl lagern, jedoch **auf keinen Fall tiefrieren**.

- Bei Eintreffen der Probe im Labor **bis 14:00 Uhr** des Bronchoskopietages kann die filtrierte BAL **nativ**, unzentrifugiert und ohne Medium transportiert werden. *Bitte erkundigen Sie sich zuvor bei Ihrem Laborkurier oder setzen Sie sich mit uns in Verbindung.*
- Bei Eintreffen der Probe im Labor **nach 14:00 Uhr** des Bronchoskopietages, z. B. aufgrund längerer Transportwege oder Spätabholung, muss die BAL in einem **Versandmedium stabilisiert** werden. Hierzu die BAL nach Filtration zentrifugieren (10 Min. bei 500 x g, keine Glasgefäße), den Überstand verwerfen (ggf. Gesamtmenge notieren), das Sediment mit 5 ml Versandmedium auffüllen und resuspendieren und im gut verschlossenen Kunststoffgefäß zur (Spät-)Abholung durch den Laborkurier bereitstellen. Das **Versandmedium sollte vor Gebrauch eingefroren** und bei Bedarf aufgetaut werden. Findet eine Farbveränderung von rosa nach gelb statt, verwerfen Sie bitte das Medium!

MATERIALANNAHME:

Werktäglich (Montag bis Freitag), nicht an Wochenenden und Feiertagen.

Bitte füllen Sie den **speziellen BAL-Anforderschein** vollständig aus und achten Sie auf die eindeutige Beschriftung des Materials.

BESTELLUNG VON ENTNAHMEMATERIAL:

Transportgefäße, Zellsiebe, vorkonfektioniertes (5 ml) Versandmedium und BAL-Anforderscheine sowie besonders gekennzeichnete Verpackungen können über unsere **Einsenderbetreuung** bestellt werden:

Telefon: 0751 502-40

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung!

Dr. med. Sabine Drache
Ärztliche Leitung Hämatologie
Telefon: 0751 502-269

Dr. rer. nat. Susanne Deininger
Naturwissenschaftlich-technische Leitung Hämatologie
Telefon: 0751 502-315